

# alcohol security

Hoe stel ik de alcoholtesters in voor Passief gebruik ( Cup )

Dit geldt ALLEEN voor toestellen met serienummer begint met een 2

Toestellen die beginnen met serienummer 1 start direct passief (Cup) op



Doe de cup goed op de tester, zorg dat de twee gaatjes van de cup op de twee pinnetjes zitten van het toestel. (erop drukken en schuiven !)

Druk beide knoppen tegelijk in van het toestel.1  
Deze zitten aan de voor en achterkant van het toestel.

In de display staat nu RCL.  
druk 1 maal op de knop op de achterzijde van het toestel.

In de display staat nu PAS

Druk 1 maal op de knop aan de voorzijde ( onder de display )

In de display komt nu de tempartuur te staan, deze zal binnen enkele seconden veranderen in de tekst PAS.

Nu is het toestel klaar voor de test.

De personen die getest moeten worden **op afstand** van ca 7 cm. in de cup laten blazen.

Na te test verschijnt de uitslag in de display.

BV NEG Groen of 0,00  
Of ziet eer rood scherm of een percentage

Om de volgende test te doen druk dan ca. 2 sec. op de knop op de achterzijde van te tester totdat de temperatuur weer verschijnt en overschakelt vaan PAS.

Klaar voor de volgende test.